

Specifiche tecniche degli ausili per il montaggio a vuoto



Active 3 Erection System



Erection System Manuale

**a) Alimentazione:**

Modello di dispositivo	Tipo di alimentazione
Erection System Manuale	Non richiede alcuna alimentazione, funziona manualmente.
Active 3 Erection con motore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteria agli ioni di litio</li> <li>- Caricare la batteria utilizzando un cavo di ricarica USB, tipo A, tramite due contatti di ricarica magnetizzati nell'alloggiamento</li> <li>- Visualizzare lo stato di carica tramite display LED</li> </ul>

**b) Illuminazione:**

Modello di dispositivo	Concetto di illuminazione
Erection System Manuale	Non richiede alcuna illuminazione, funziona manualmente
Active 3 Erection System	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Fase I - accensione del dispositivo:</u></li> <li>- <u>I simboli dei pulsanti Power e Air sono retroilluminati in bianco.</u></li> <li>- <u>Il cilindro è retroilluminato in bianco</u></li> <li>- <u>Fase II – Mantenimento del vuoto:</u></li> <li>- <u>I simboli sui pulsanti Power e Air si illuminano per 5 secondi Dopo;</u></li> <li>- <u>Successivamente non sono più retroilluminati</u></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità di carico ≤ 20%:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul pulsante di accensione si illumina di rosso</li> </ul> </li> <li>- Capacità di ricarica con cavo di ricarica collegato e capacità di ricarica compresa tra 0 e 100%:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simbolo sul pulsante di accensione retroilluminato in rosso Lampeggia ogni 5 secondi (respirazione)</li> </ul> </li> <li>- Capacità di ricarica 100% (cavo di ricarica collegato):             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simbolo sul pulsante di accensione retroilluminato permanentemente in bianco.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

**c) Potenza di aspirazione:**

Modello di dispositivo	Potenza di aspirazione
Erection System Manuale	max. 46kPa
Active 3 Erection System	max. 46kPa

**d) Elettronica di controllo:**



Modello di dispositivo	Operazione di controllo
Erection System Manuale	Pulsante ventilazione di emergenza (non elettrico)
Active 3 Erection System	Pulsante I/O Pulsante di ventilazione di emergenza LED per illuminare il cilindro

**e) Protezione contro gli spruzzi d'acqua:**

Modello di dispositivo	Schutzart
Erection System Manuale	Non necessario perché la testa della pompa è azionabile manualmente.
Active 3 Erection System	grado di protezione IP 22

### Contenuto packaging

I sistemi Erection System Manuale e Active 3 Erection System, sono così composti:

Modello di dispositivo	Contenuto
<p>Erection System Manuale</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 testata pompa ad azionamento manuale</li> <li>- 1 cilindro trasparente</li> <li>- 1 manicotto guida grande</li> <li>- 1 manicotto guida piccolo</li> <li>- 1 cono</li> <li>- 5 anelli di costrizione di diverse dimensioni (marcatura CE)</li> <li>- 1 tubetto di lubrificante (marcatura CE)</li> <li>- 1 manuale di istruzioni</li> <li>- 1 custodia per riporre</li> </ul>
<p>Active 3 Erection System</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 testata della pompa ricaricabile ad azionamento elettrico</li> <li>- 1 cilindro trasparente</li> <li>- 1 manicotto guida grande</li> <li>- 1 manicotto guida piccolo</li> <li>- 1 cono</li> <li>- 5 anelli di costrizione di diverse dimensioni (marcatura CE)</li> <li>- 1 tubetto di lubrificante (marcatura CE)</li> <li>- 1 manuale di istruzioni</li> <li>- 1 custodia per riporre</li> </ul>

**Fabbricante**

**Medintim**

**Rivenditore**



**Ile Medical Srl**  
**Via G. Deledda, 34 09090**  
**Palmas Arborea Italia**  
**tel. +39 0783 255229 info@ilemedical.it**

creato/modificato: Becker, Antje / 28.08.2023  
 controllato: Becker, Antje / 28.08.2023  
 Approvato: Kessel, Martin / 28.08.2023

Revision: 005/28.08.2023  
 Dateiname: 1.1.6.1 Technische Spezifikationen AES  
 Formblatt: FB\_035\_Vortage\_QM